

NÁVOD

Límec VymazlenejCZ je vyroben z praktického měkkého a omyvatelného materiálu, který poskytuje zvířeti pohodlí při rekonvalescenci. Pro jeho funkčnost a pohodlné marodění bez stresu a omezení je potřeba zvolit správnou velikost límce a po nasazení zajistit dle následujících instrukcí.

- **Rozepněte suché zipy a umístěte límec zvířeti na krk (vzorem vzhůru)!**
- **Zajistěte u krku suchým zipem a obojkem, který nastavte na obvod krku zvířete!**
- **Ostatní suché zipy spojte tak, aby mezi jednotlivými částmi límce nevznikla mezera!**
- **V případě potřeby je možné límec více uzavřít do kornoutku pomocí dalších přidavných zipů, kterými límec disponuje a jsou k tomuto účelu určené.**
- **V tomto případě je nutné odejmout vespod límce krytku, na kterou se překrývající spodní část límce díky suchému zipu připevní. To zajistí, aby překrývající se části k sobě přilehly a zvířeti nevadily v pohybu.**
- **ZKONTROLUJTE, ŽE JE LÍMEC DELŠÍ NEŽ ČUMÁK ZVÍŘETE!**
Jen tak může plnit svůj účel a vytvořit adekvátní zábranu před dostáním na ránou.

POZOR:

Pokud byl límec delší dobu ve skříni, pamatujte, že jej NEDOPORUČUJEME na ochranu zranění V OBLASTI HLAVY a ZADNÍCH NOHOU. Zde záleží vždy na rase, stavbě těla zvířete i jeho povaze.

ÚDRŽBA:

Límec je vyroben z molitanu a omyvatelné kočárkoviny (100% polyester), proto jej v případě potřeby přeperte v ruce s použitím jemného čistícího prostředku.



VymazlenejCZ

www.vymazlenej.cz, info@vymazlenej.cz

Petra Žaludová, Zábělská 21, Plzeň, IČ: 09981284